

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ.

1. Βάζω στη θέση του autocal απεσταγμένο νερό σε ποτήρι και κάνω 10-20 φορές prime.
2. Βγάζω το νερό και κάνω prime με το σωληνάκι στον αέρα 3 φορές.
3. Τοποθετώ το autocal πίσω στον αναλυτή και κάνω 2 φορές prime.
4. Το αφήνω να μουλιάσει ελέγχω αν λειτουργεί και συνεχίζω τη ρουτίνα μου.