

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 ΗΜΕΡΕΣ

Με τον αναλυτή σε κατάσταση stand by κάνουμε τα παρακάτω βήματα.

1. Βγάζουμε τα σωληνάκια από τα εξωτερικά δοχεία με ένδειξη probe rinse, και cleaning solution και τα βάζουμε μέσα σε ένα μπουκάλι με απιονισμένο νερό.
2. Κάνουμε ένα πλύσιμο κυβετών (wash cuvettes) και ένα έλεγχο καθαρότητας κυβετών (water blank level). Προσοχή (οι κυβέτες γίνονται κόκκινες).
3. Κλείνουμε τον αναλυτή.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ.....

1. Ανοίγουμε τον αναλυτή
2. Φτιάχνουμε καινούργια υγρά πλυσίματος ,αφού ξεπλύνουμε καλά όλα τα δοχεία
3. Βάζουμε όλα τα σωληνάκια των δοχείων στην σωστή τους θέση.
4. Κάνουμε ένα πλύσιμο κυβετών (wash cuvettes) και ένα έλεγχο καθαρότητας κυβετών (water blank level)
5. Επαναλαμβάνουμε το βήμα 4
6. Αρχίζουμε την ρουτίνα