

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ERMA PCE 210 ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΩΝ

1. Από το κεντρική οθόνη εργασίας πατάμε MENU.
2. Πατάμε MAINTENANCE.
3. Πατάμε STORAGE.
4. Στην οθόνη εμφανίζονται τρία βήματα (STEP 1 το οποίο και είναι άσπρο φωτισμένο. STEP2 και STEP3).
5. Βγάζουμε όλα τα ακροφύσια των τριών αντιδραστηρίων από τα μπετόνια και τα βάζουμε πάνω στον πάγκο. ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΑΝ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.
6. Πατάμε το STEP1.
7. Μόλις γίνει το STEP2 άσπρο, βάζουμε τα τρία ακροφύσια μέσα σε απεσταγμένο νερό, και πατάμε το STEP2.
8. Μόλις γίνει το STEP3 άσπρο, βγάζουμε και τα τρία ακροφύσια από το απεσταγμένο νερό, και τα ακουμπάμε στον πάγκο.
9. Πατάμε το STEP3.
10. Όταν γίνει το STEP1 άσπρο, βάζουμε και τρία ακροφύσια στα αντίστοιχά τους μπετόνια και σβήνουμε τον αναλυτή από το κουμπί ON?OFF μπροστά.

Η επανεκκίνηση του αναλυτή γίνεται κανονικά μόνο που πριν αρχίσουμε να τρέχουμε τα δείγματα και μέσω του πλήκτρου EXTEND κάνουμε prime στο λυτικό πατώντας το πλήκτρο HEMOLYZE EXCHANGE.

Μόλις αυτό τελειώσει πατώντας το RETURN γυρίζουμε στην οθόνη εργασίας.