

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Για την διαδικασία καθαρισμού χρησιμοποιούμε το deproteinized solution και την κάνουμε μια φορά την εβδομάδα.

Από το κεντρικό menu πατάμε τον αριθμό 5 ή με τα βελάκια επιλέγουμε την εντολή maintain και πατάμε enter. Στην οθόνη που εμφανίζεται πατάμε τον αριθμό 4 που αντιστοιχεί στην εντολή deproteinize electrode, το ρύγχος βγαίνει προς τα έξω και η οθόνη γραφεί

DEPROTEINIZE ELECTRODE

READY FOR DEPROTEINIZING

ENTER – ASP MENU - RETURN

Τοποθετούμε το deproteinize solution κάτω από το ρύγχος και πατάμε το enter. Μόλις ακούσουμε την ηχητική προειδοποίηση απομακρύνουμε το deproteinize solution και το ρύγχος κατεβαίνει στην αρχική του θέση. Αυτή η διαδικασία διαρκεί 1 ώρα και στην οθόνη εμφανίζεται

DEPROTEINIZE ELECTRODE DEPROTEINIZE
ELECTRODE

10%

PASSED TIME : 06 : 14

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μια φορά την εβδομάδα πρέπει να γίνεται ενεργοποίηση των ηλεκτροδίων για να παρατείνεται η διάρκεια ζωής τους.

Για την διαδικασία ενεργοποίησης χρησιμοποιούμε φρέσκο ορό ή το υγρό QC. Από το κεντρικό menu πατάμε το κουμπί ACTIVITY, το ρύγχος βγαίνει προς τα έξω και πατάμε το πλήκτρο enter (αφού έχουμε τοποθετήσει κάτω από το ρύγχος το υγρό).

Η διαδικασία κρατάει 1 ώρα και όταν τελειώσει ο αναλυτής κάνει μόνος του calibration. Μόλις τελειώσει το calibration στην οθόνη εμφανίζεται το κεντρικό menu και μπορούμε να τρέξουμε τα δείγματα μας.