

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 ΗΜΕΡΕΣ

Με τον αναλυτή σε κατάσταση stand by κάνουμε τα παρακάτω βήματα.

1. Βγάζουμε τα σωληνάκια από τα εξωτερικά δοχεία με ένδειξη probe rinse, και cleaning solution και τα βάζουμε μέσα σε ένα μπουκάλι με απεσταγμένο νερό.
2. Κάνουμε ένα πλύσιμο κυβετών (wash cunvetes) και ένα έλεγχο καθαρότητας κυβετών (water blank level). Προσοχή (οι κυβέτες πιθανότατα γίνονται κόκκινες).
3. Κλείνουμε τον αναλυτή.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ.....

1. Ανοίγουμε τον αναλυτή.
2. Φτιάχνουμε καινούργια υγρά πλυσίματος ,αφού ξεπλύνουμε καλά όλα τα δοχεία.
3. Βάζουμε όλα τα σωληνάκια των δοχείων στην σωστή τους θέση.
4. Κάνουμε ένα πλύσιμο κυβετών (wash cunvetes) και ένα έλεγχο καθαρότητας κυβετών (water blank level).
5. Επαναλαμβάνουμε το βήμα 4.
6. Αρχίζουμε την ρουτίνα.