

## ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ MICROS 60

Απαραίτητα εργαλεία.

- a. Υποχλωριώδες
- b. Σύριγγα
- c. Ειδικό κλειδί για άνοιγμα πρόσοψης.

1. Από κεντρική οθόνη πατάμε esc
2. Πατάμε τον αριθμό 4 για να εισέλθουμε στο Service και πατάμε Enter.
3. Πατάμε τον αριθμό 4 για να εισέλθουμε στο Concentrated cleaning  
'Ο αναλυτής μας εμφανίζει το μήνυμα :

**'PLEASE OPEN COVER DOOR  
PRESS A KEY TO CONTINUE'**

4. Ανοίγουμε την πρόσοψη από το αριστερό μέρος του αναλυτή με το ειδικό κλειδί και πατάμε ένα πλήκτρο για να συνεχίσουμε.  
'Ο αναλυτής στην οθόνη αναγραφεί το μήνυμα :

**'POUR 3 ml OF CLEANER IN THE WBC CHAMBER  
AND PRESS A KEY TO CONTINUE...'**

5. Τοποθετούμε με μια σύριγγα 3 ml Υποχλωριώδες στο αριστερό δοχείο που βρίσκεται μέσα στο μαύρο κουτί με το κίτρινο αυτοκόλλητο με προσοχή μη μας χυθεί απ' έξω και πατάμε ένα πλήκτρο για να συνεχίσουμε.  
'Ο αναλυτής στην οθόνη αναγραφεί το μήνυμα :

**'POUR 3 ml OF CLEANER IN THE RBC CHAMBER  
AND PRESS A KEY TO CONTINUE...'**

6. Τοποθετούμε με μια σύριγγα 3 ml Υποχλωριώδες στο δεξί δοχείο που βρίσκεται μέσα στο μαύρο κουτί με το κίτρινο αυτοκόλλητο με προσοχή μη μας χυθεί απ' έξω και πατάμε ένα πλήκτρο για να συνεχίσουμε.  
'Ο αναλυτής μας εμφανίζει το μήνυμα :

**'PLEASE OPEN COVER DOOR  
PRESS A KEY TO CONTINUE'**

7. Κλείνουμε το πορτάκι και βιδώνουμε τη βίδα με το ειδικό κλειδί.
8. Πατάμε Enter και ο αναλυτής συνεχίζει μόνος του τη διαδικασία καθαρισμού.

Στην οθόνη αναγράφεται ο χρόνος που χρειάζεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στο τέλος της διαδικασίας απαραίτητο είναι να βρούμε με esc στη κεντρική οθόνη και από εκεί να πατήσουμε το πλήκτρο Start up για έλεγχο του Background