

## **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 ΗΜΕΡΕΣ (STORAGE)**

Αφαιρούμε τα σωληνάκια από όλα τα αντιδραστήρια και ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα...

1. Πατάμε esc
2. Πατάμε το 4, αριθμός που αντιστοιχεί στο Service και πατάμε Enter.
3. Πατάμε 3, Prime.
4. Πατάμε το 1 All reagents
5. Περιμένουμε να τελειώσει αυτή η διαδικασία.
6. Μετά τοποθετούμε όλα τα ακροφύσια σε δοχείο με απεσταγμένο νερό και πατάμε τον αριθμό 1

Κατά την επιστροφή μας επανατοποθετούμε τα σωληνάκια σε δοχείο με απεσταγμένο νερό και αφού ανοίξουμε τον αναλυτή και αυτός τελειώσει με το start up, αφαιρούμε τα σωληνάκια από το απεσταγμένο νερό και με τα σωληνάκια στον αέρα.

1. Πατάμε esc
2. Πατάμε το 4, αριθμός που αντιστοιχεί στο Service και πατάμε Enter.
3. Πατάμε το 3 Prime.
4. Πατάμε το 1 All reagents.
5. Περιμένουμε να τελειώσει αυτή η διαδικασία.
6. Μετά τοποθετούμε όλα τα ακροφύσια στα αντίστοιχα αντιδραστήρια και πατάμε τον αριθμό 1

Στο τέλος της διαδικασίας απαραίτητο είναι να βγούμε με esc στη κεντρική οθόνη και από εκεί να πατήσουμε το πλήκτρο Start up για έλεγχο του Background