

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ PENTRA 60

Απαραίτητα εργαλεία.

- a. Υποχλωριώδες
- b. Σύριγγα
- c. Κατσαβίδι ίσιο

1. Από κεντρική οθόνη πατώ esc
2. Πατώ τον αριθμό 5 για να εισέλθω στο Maintenance
3. Πατώ τον αριθμό 3 για να εισέλθω στο Hydraulic systems.
4. Πατώ τον αριθμό 4 για να εισέλθω στο Concentrated cleaning

Άμεσα ο αναλυτής ξεκινά τη διαδικασία αδειάσματος και όταν στην οθόνη αναγραφεί το μήνυμα :

**POUR 3 ml OF MINOCLAIR INTO CHAMBERS
AND PRESS ENTER KEY TO CONTINUE.**

5. Ανοίγουμε το δεξί πορτάκι με τις δύο βίδες και τοποθετούμε με μια σύριγγα 3 ml υποχλωριώδους σε κάθε ένα από τα πέντε δοχεία με προσοχή χωρίς να χυθεί απέξω.
6. Κλείνουμε το πορτάκι και βιδώνουμε τις βίδες.
7. Πατάμε Enter και ο αναλυτής συνεχίζει μόνος του τη διαδικασία καθαρισμού.

Στο τέλος της διαδικασίας απαραίτητο είναι να βγούμε με esc στη κεντρική οθόνη και από εκεί να πατήσουμε το πλήκτρο Start up για έλεγχο του Background(βλ σελ 2.)