

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΗΜΕΡΩΝ

1. Από κεντρική οθόνη πατώ το πλήκτρο του **service** πάνω αριστερά.
2. Εκεί στο αναδυόμενο μενού επιλέγω **Hydraulic Systems**.
3. Στη νέα οθόνη, επιλέγω την τέταρτη επιλογή από αριστερά στη δεύτερη γραμμή **Prime Cycles**.
4. Στην επόμενη οθόνη πατώ το πλήκτρο του **Unprime All**.
5. Μετά το τέλος της διαδικασίας τοποθετώ όλα τα σωληνάκια σε απεσταγμένο νερό και πατώ το πλήκτρο **All Reagents**.

Όταν οι διαδικασίες τελειώσουν βγαίνω στη κεντρική οθόνη με το πλήκτρο **Close** και ακολουθώ το σβήσιμο αναλυτή όπως περιγράφεται προηγουμένως.

Κατά την επιστροφή μας επανατοποθετούμε τα σωληνάκια σε δοχείο με απεσταγμένο νερό και αφού ανοίξω τον αναλυτή και αυτός τελειώσει με το start up.....

1. Από κεντρική οθόνη πατώ το πλήκτρο του **service** πάνω αριστερά.
2. Εκεί στο αναδυόμενο μενού επιλέγω **Hydraulic Systems**.
3. Στη νέα οθόνη, επιλέγω την τέταρτη επιλογή από αριστερά στη δεύτερη γραμμή **Prime Cycles**.
4. Στην επόμενη οθόνη πατώ το πλήκτρο του **Unprime All**.
5. Μετά το τέλος της διαδικασίας τοποθετώ όλα τα σωληνάκια στα αντίστοιχα αντιδραστήρια και πατώ το πλήκτρο **All Reagents**.

Περιμένω να ολοκληρωθεί η διαδικασία και βγαίνω στη κεντρική οθόνη με το πλήκτρο **close** και από εκεί πατώ το πλήκτρο **Start up** για έλεγχο του Background(