


## ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ Η' ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CLOG



1. Από κεντρική οθόνη πατώ το πλήκτρο του **service**
2. Στην επόμενη οθόνη πατώ το πλήκτρο του **concentrated cleaning**



3. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα

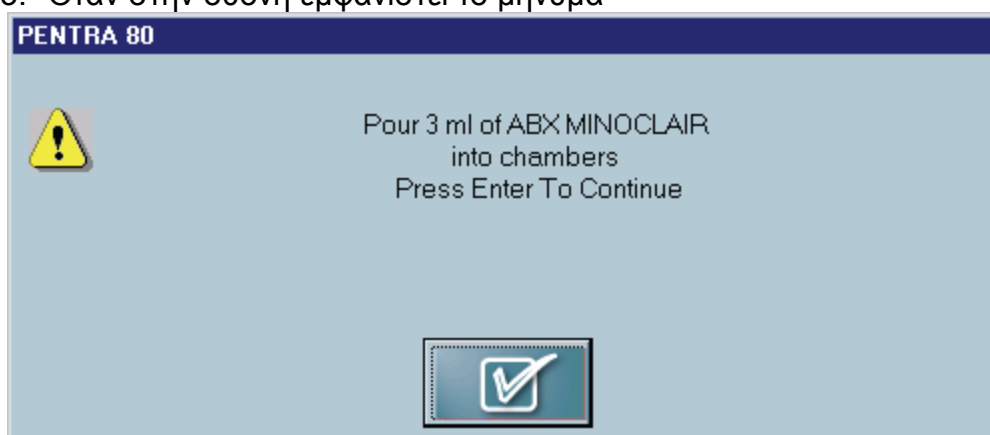

Ανοίγω το δεξί πορτάκι του αναλυτή ξεβιδώνοντας τις δυο βίδες και βάζω 3ml Υποχλωριώδες σε κάθε ένα από τα πέντε μπανάκια. Κλείνω το πορτάκι

και πατώ .

4. Περιμένω να ολοκληρωθεί η διαδικασία και βγαίνω στη κεντρική οθόνη με το πλήκτρο 