

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΠΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ)

Με σβηστό τον αναλυτή χρησιμοποιώντας έναν βαμβakoφόρο στυλεό, τον οποίο έχουμε βρέξει με λίγο οινόπνευμα, καθαρίζουμε προσεκτικά την οπή μέτρησης.

Αφού τελειώσουμε τον καθαρισμό περιμένουμε να εξατμιστεί το οινόπνευμα και ανοίγουμε τον αναλυτή για να συνεχίσουμε την ρουτίνα μας.