

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

1. Ανοίγουμε τον αναλυτή από το πίσω μέρος με το κουμπί δίπλα στο φως του ρεύματος.
Η οθόνη γράφει CHECK QC CONTROL.
2. Πατώ ESC και περιμένω να βγει μια οθόνη με αριθμούς, δίπλα από τους οποίους υπάρχει για το καθένα μια τελεία.
3. Για να βάλω τους ασθενείς μου πατώ ENTER και πάλι ENTER στο INPUT ID.
4. Γράφω το ID του ασθενή μου και πατώ πάλι ENTER. Ο αναλυτής αυτή τη στιγμή ζητεί το σωληνάριο του πρώτου ασθενή. Βάζοντας το σωληνάριο στην αντίστοιχη θέση ξεκινά η μέτρηση της ταχύτητας.
Για να βάλουμε τον επόμενο ασθενή παρατηρούμε ό,τι ο κέρσορας αναβοσβήνει στη θέση 2. Οπότε γράφουμε απλά τον αριθμό του ασθενή, πατάμε ENTER και βάζουμε το δεύτερο σωληνάριο στη δεύτερη θέση.
5. Όταν ολοκληρώσουμε τη καταχώρηση των ασθενών τότε πατούμε 2 φορές ESC και έτσι βγαίνουμε πάλι στην οθόνη με τους αριθμούς, μόνο που τώρα δίπλα από τους αριθμούς υπάρχει και ένα θαυμαστικό στις θέσεις που έχουμε καταχωρήσει δείγματα.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα θα είναι έτοιμα σε μισή ώρα αλλά το αποτέλεσμα θα είναι εκφρασμένο σε mm ανά 1 ώρα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μόλις το θαυμαστικό δίπλα από το νούμερο γίνει αστεράκι τότε το αποτέλεσμα είναι έτοιμο. Για να δω τα αποτελέσματα πατώ ENTER με το κάτω βέλος πηγαίνω στο RESULTS πατώ ENTER δύο φορές και βλέπω τα αποτελέσματα στη στήλη της μιας ώρας.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τέλος για να σβήσω τα αποτελέσματα της ημέρας, από τη κεντρική οθόνη πατώ ENTER, με το βέλος πάω RESULTS, πατώ ENTER με βέλος πάω κάτω στο RESULTS DELETE και πατώ CANCEL.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΑΝΑΛΥΤΗ

Για να κλείσω τον αναλυτή απλά σβήνω το κουμπί στο πίσω μέρος του.